



DENTSPRY INTERNATIONAL  
ДЕНТСПРАЙ ИНТЕРНЭШНЛ

## Стеклоиономерный Цемент АКВАЦЕМ

### НАЗНАЧЕНИЕ

«Аквацем» применяется для цементирования коронок и мостов. Обладает химической адгезией к тканям зуба, прозрачен, образует очень тонкую пленку и не раздражает пульпу. Прост в приготовлении : необходимо смешать с водой.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка к работе

**ПОРОШОК :** Каждый раз перед применением содержимое необходимо взрыхлить, избегая пузырек несколько раз. Набрать ложку порошка с горкой и снять излишки (горку) шпателем, чтобы порошок и края ложки образовали одну плоскость. Выложить порошок из ложки на одну половину смешательного блокнота.

**ВОДА :** Наполнить капельницу дистиллированной водой. На свободную половину смешательного блокнота поместить необходимое количество воды. Для этого капельницу перевернуть вверх дном и, держа вертикально, выдавить каплю воды.

#### Дозирование

2 ложки порошка на 4 капли воды.

#### Смешение

Разделить дозу порошка на 2 части. Внести одну из частей в воду. Как только порошок станет влажным, добавить вторую часть порошка. Быстро размешать до получения кремнеобразной массы.

#### Время замешивания

Не более 15 секунд.

#### Рабочее время

После замешивания 2,5 минуты отводится для нанесения состава (при температуре 23°С).

#### Нанесение

Состав необходимо нанести сразу после замешивания, пока он выглядит блестящим.

#### Время затвердевания

Около 5 минут от начала замешивания.

#### Обработка

Снять излишки сразу после нанесения или после затвердевания состава. Прикасаться к составу во время его затвердевания (полимеризации) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

## ВНИМАНИЕ !

Так как состав «Акацем» имеет высокую алгезионную способность, все шпатель, стеклянные смесительные пластины и инструменты необходимо промывать проточной водой немедленно по окончании работы до полного затвердевания состава.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания порошка в глаза. В случае попадания, немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.

## ИЗОЛЯЦИЯ ПУЛЬВЫ

Глубокие полости требуют применения прокладочного материала на основе гидроксида кальция («Дайкал»), который наносится на дентин в месте, наиболее приближенном к пульпе.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре. Повышенное содержание влаги в воздухе может нарушить свойства порошка, поэтому по окончании работы с материалом, пуэзырек необходимо закрыть крышкой.

## СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА

- 30 г порошка
- капельница для воды
- смесительный блокнот
- мерная ложка

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Завод фирмы «Дентсплай Интернешнл» в ФРГ.